



Guldmann™
Mobile Personenlifter



Mobile Personenlifter

Mobiler Personenlifter GL5

Der mobile Personenlifter GL5 bildet die bodengestützte Alternative zu deckenmontierten Personenliftern und Transfersystemen. Sie sind ein Hauptbestandteil des Gesamtkonzepts von Guldmann für sichere, zuverlässige Lösungen, die dem Helfer eine ergonomische Arbeitsweise ermöglichen. Außerdem bieten sie dem Betroffenen Komfort und ein Gefühl von Sicherheit während des Hebevorgangs. Diese mobilen Personenlifter eignen sich insbesondere für unvorgesehene, seltene oder einmalige Hebesituationen, in denen kein Deckenlifter zur Verfügung steht oder ein solcher nicht einsetzbar, unpraktisch oder nicht kosteneffizient ist.

Auf- und Abwärtsbewegung in unerwarteten Situationen

Der mobile Personenlifter GL5 kann für Hebevorgänge vom Bodenniveau aus eingesetzt werden, so dass Helfer sogar sehr große Personen in einem großen Sitz mit wenig Kraftaufwand heben können. Sie können damit Personen mit 205 kg Gewicht heben.

Der mobile Personenlifter GL5 hat folgende Vorteile:

- Große Reichweite – der Benutzer kann immer korrekt positioniert werden, auch in breiten Betten
- Hebevorgänge aus niedrigen Niveaus – sogar vom Bodenniveau
- Große Hubhöhe – die Lifter heben selbst große Personen in großen Sitzen
- Flexibilität – mit dem richtigen Sitz bewältigt ein mobiler Personenlifter der GL5-Reihe nahezu alle Hebevorgänge

GLS5 Aktiver Personenlifter

Wie auch der GL5 ist der GLS5 ein aktiver Personenlifter, der für die Erleichterung der Alltagsroutine von Benutzern und Helfern entwickelt wurde. Der GLS5 hebt den Benutzer aus der Sitz- in die Standposition und ist eine nützliche Hilfe bei den häufigen täglichen Transfers zwischen Bett, Stuhl und Badezimmer.

Um den GLS5 verwenden zu können, muss der Benutzer mindestens eine teilweise Oberkörperkontrolle haben und in der Lage sein, mit dem Helferpersonal zusammenzuarbeiten.

Ein Lifter – viele Funktionen

- das Aufstehen
- Wiedererlangung der Standfähigkeit (ohne Fußstütze)
- Transfer von Stuhl zu Stuhl
- Transfer von Bett zu Stuhl
- Transfer von Bett/Stuhl zu Toilette

Bedienerfreundlich – sicher in der Anwendung


Der GL5 und GLS5 machen Hebevorgänge sowohl für den Helfer als auch den Betroffenen erheblich leichter und können beim Personal das Belastungs- und Verletzungsrisiko des Rückens deutlich verringern. Die Bedienung der mobilen Personenlifter ist einfach und intuitiv. Die Personenlifter sind robust, stabil und sicher. Sie werden entweder mit der Handbedienung oder mit dem Bedienpult der Steuereinheit bedient. Sie verfügen über eine einfach herausnehmbare Batterie, die im Lifter oder außerhalb geladen werden kann. Die mobilen Personenlifter enthalten eine akustische und optische Anzeige für niedrigen Batterieladestand. Damit wird eine zuverlässige Ladung sichergestellt, wodurch die mobilen Personenlifter bei Bedarf stets betriebsbereit sind.

Intelligenter Personenlifter – bereit für die Zukunft

Die Personenlifter GL5 und GLS5 sind mit modernster Technologie ausgestattet, die Zugang zu Statistiken via SIC (Service Information Console) bieten:

- Anzahl der Hebevorgänge
- Anzahl der Hebevorgänge seit der letzten Wartung
- Lebensdauer der Komponenten (Hebemotor, Batterie)
- Fehlerberichte

Die Personenlifter sind vorbereitet für zukünftige Software-Updates.

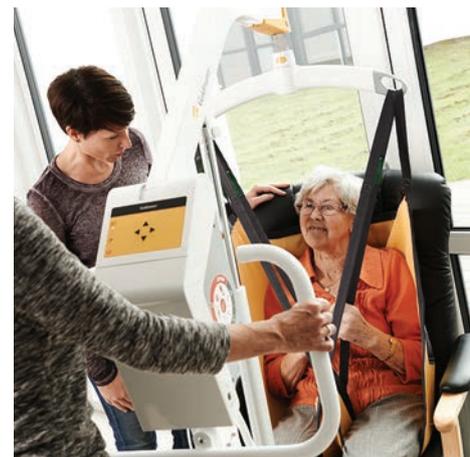


GL5 Mobiler Personenlifter



Der mobile Personenlifter GL5 ist ein Allroundlifter, der zusammen mit den Guldmann Hebesitzen und dem Zubehör den Großteil aller Hebe- und Transportanforderungen erfüllt

GL5 Mobiler Personenlifter

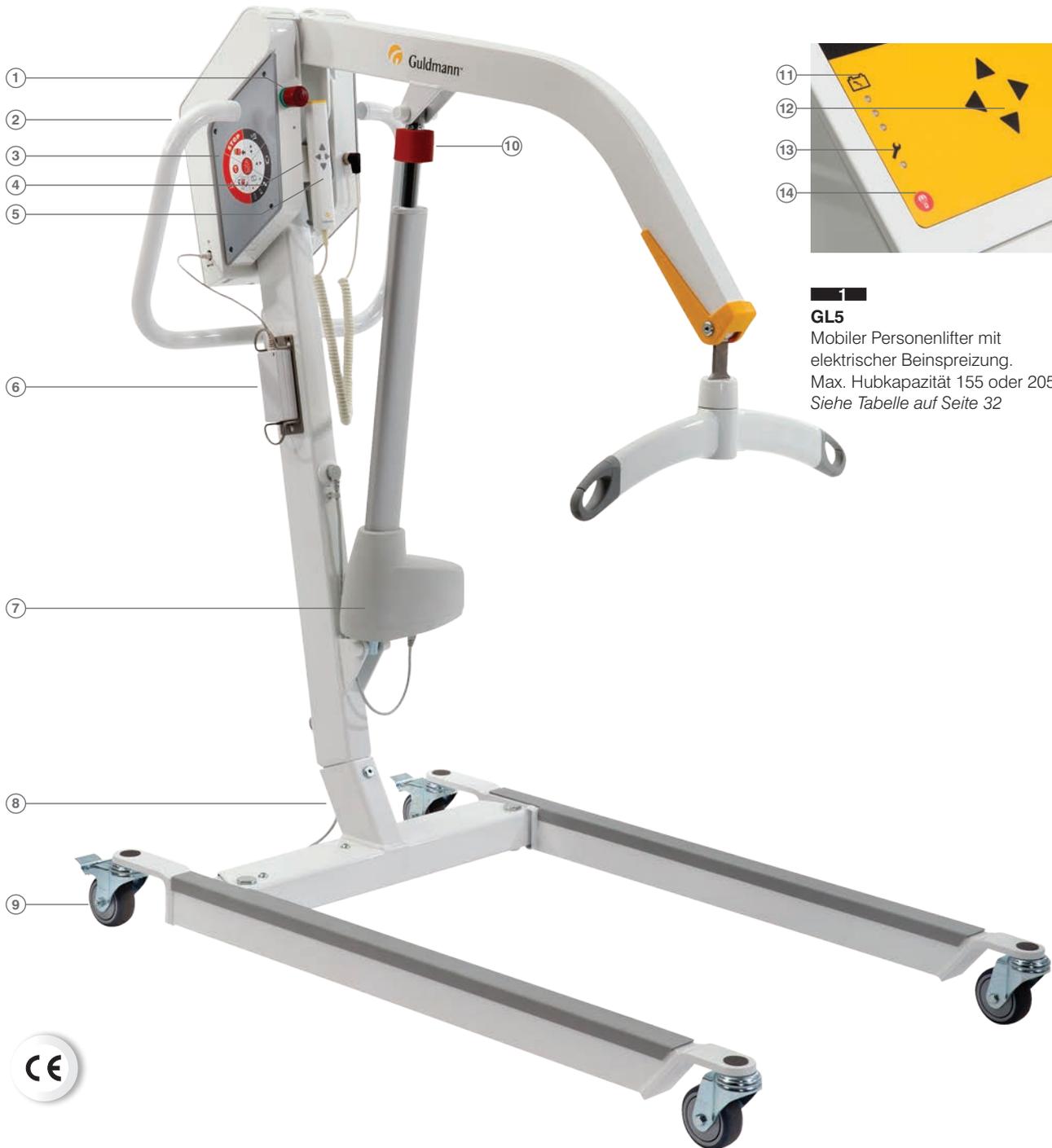

GL5
 Mobiler Personenlifter mit elektrischer Beinspreizung.
 Max. Hubkapazität 155 oder 205 kg
 Siehe Tabelle auf Seite 32

- ① Notausschaltung
- ② Einfacher Zugang zum Akkufach
- ③ Überprüfung der 'Anwendungsschritte' jederzeit ablesbar
- ④ Halterung für Handbedienung
- ⑤ Bedienerfreundliche Handbedienung
- ⑥ Ladegerät
- ⑦ Sie haben die Wahl: Der GL5 kann mit um 90° gedrehtem Hebemotor geliefert werden

- ⑧ Integrierte Motoren für erweiterten Schutz
- ⑨ Bremslenkrollen 80 oder 100 mm
- ⑩ Manuelle Notabsenkung (optional)
- ⑪ Audiosignal und optische Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- ⑫ Bedienkonsole
- ⑬ Optische Wartungsanzeige
- ⑭ Elektronische Notabsenkung

Max. Tragfähigkeit	155/205 kg
Anzahl der Hebevorgänge pro Batterieladung bei einer Traglast von 85 kg	50 Hebevorgänge
Wendekreis	1295 mm
Hubhöhe	max. 1759 mm min. 456 mm
Hubintervall	1303 mm
Elektrische Breiteneinstellung	max. 1410 mm min. 695 mm

GLS5 Aktiver Personenlifter



GLS5 – eine einfache, komfortable und sichere Methode, Patienten mit teilweiser oder vollständiger Oberkörperkontrolle zu heben und zu stützen

1 GLS5 Brustgurt

Funktion
Stützt den oberen Bereich von unterhalb der Schulter bis zum unteren Rücken.


Verwendung
geeignet für Personen, die zwar aufstehen, sich aber nicht aufrichten können.
S/M 28336
L/XL 28337

2 Hüftgurt

Funktion
Stützt den Hüftbereich des Körpers.

Verwendung
geeignet für Personen, die aufstehen können, aber eine Tendenz dazu haben, dass die Hüfte nach hinten wegrutscht.
..... 28338

GLS5 Aktiver Personenlifter

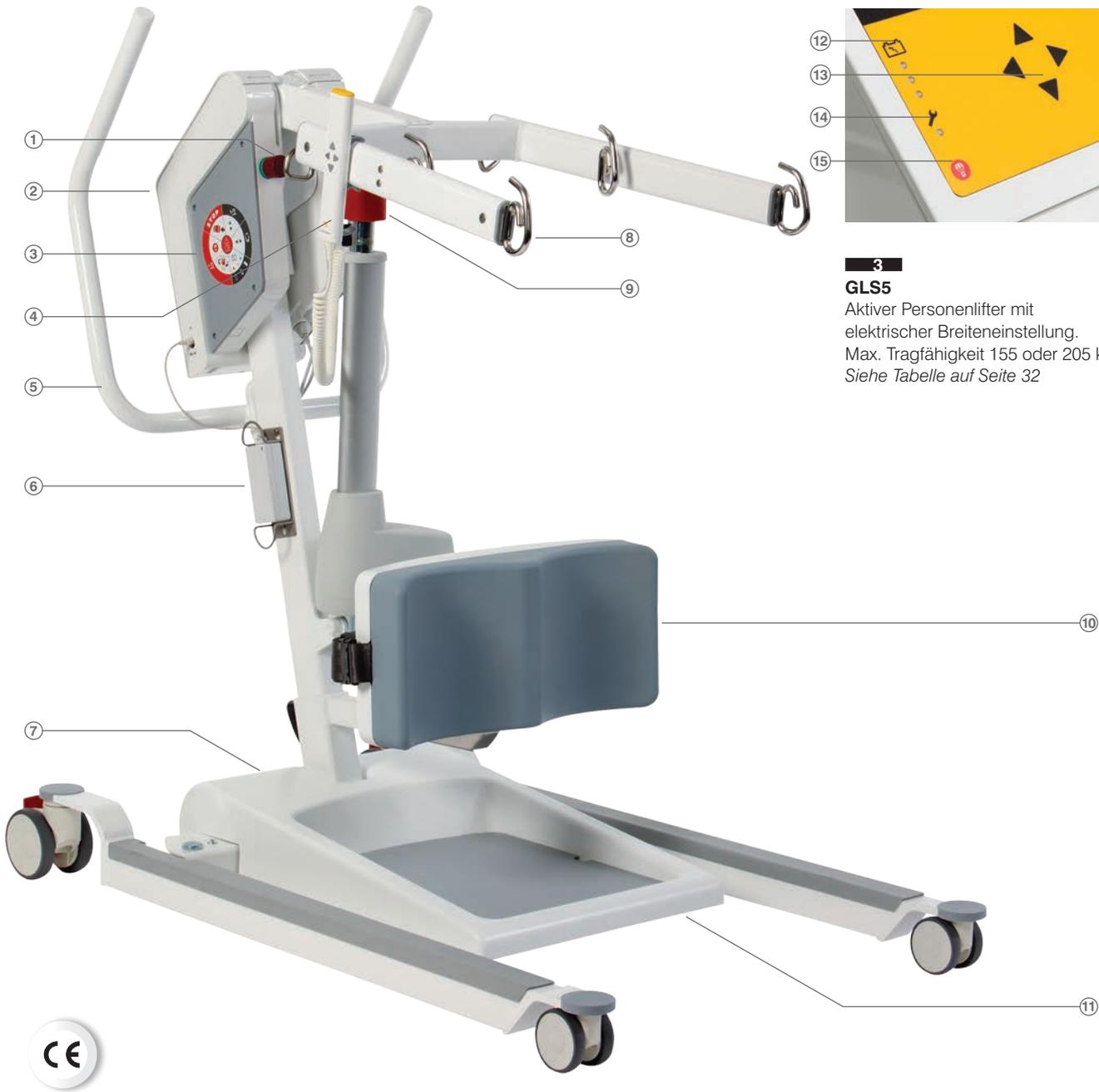

3
GLS5
 Aktiver Personenlifter mit elektrischer Breiteneinstellung.
 Max. Tragfähigkeit 155 oder 205 kg
 Siehe Tabelle auf Seite 32



- ① Notausschaltung
- ② Einfacher Zugang zum Akkufach
- ③ Überprüfung der 'Anwendungsschritte' jederzeit ablesbar
- ④ Bedienerfreundliche Handbedienung
- ⑤ Ergonomisch geformte Schiebebügel für alle Helfergrößen
- ⑥ Ladegerät
- ⑦ Rückwärtiger Fuß-Schiebebügel für eine verbesserte Manövrierbarkeit
- ⑧ Mehrere Möglichkeiten zur Sitzbefestigung
- ⑨ Manuelle Notabsenkung (optional)
- ⑩ Gepolsterte Knieauflagen, einstellbar
- ⑪ Abnehmbare und leicht zu reinigende Fußstütze
- ⑫ Audiosignal und optische Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- ⑬ Bedienkonsole
- ⑭ Optische Wartungsanzeige
- ⑮ Elektronische Notabsenkung

Max. Tragfähigkeit		155/205 kg
Wendekreis		1295 mm
Hubhöhe	max.	1740 mm
	min.	850 mm
Elektrische Breiteneinstellung	max.	994 mm
	min.	572 mm

GL5 Mobiler Personenlifter und GLS5 Aktiver Personenlifter Varianten

Artikelnummern	Artikel	Räder 100 mm	Räder 80 mm	GL5 Motor gedreht 90°	Manuelle Notabsenkung
555000	GL5 205 407 0000	x			
555001	GL5 155 407 0000	x			
555002	GL5 205 450 0000	x			x
555003	GL5 155 450 0000	x			x
555004	GL5 205 370 0000		x		
555005	GL5 155 370 0000		x		
555006	GL5 205 350 0000		x		x
555007	GL5 155 350 0000		x		x
555008	GL5 205 480 0000	x		x	
555009	GL5 155 480 0000	x		x	
555010	GL5 205 380 0000		x	x	
555011	GL5 155 380 0000		x	x	
555012	GL5 205 460 0000	x		x	x
555013	GL5 155 460 0000	x		x	x
555014	GL5 205 360 0000		x	x	x
555015	GL5 155 360 0000		x	x	x
556002	GLS5 205 560 0000				x
556001	GLS5 155 560 0000				x



4

NiMh Akku

Leicht austauschbar und externes Aufladen möglich.

.....554571



